


Träningsdefibrillator


Byte av elektroder

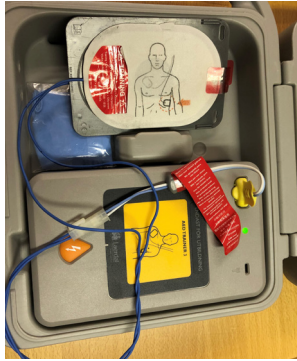


1. Byte av gamla elektroder (defibrillatorplattor)



2. Byte genom att ta isär den vid det vita låset.

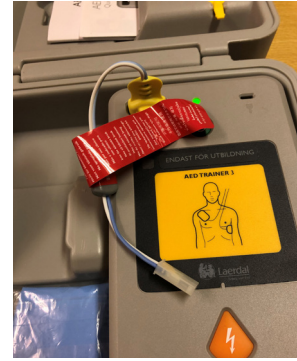

3. Gamla elektroder borttaget.

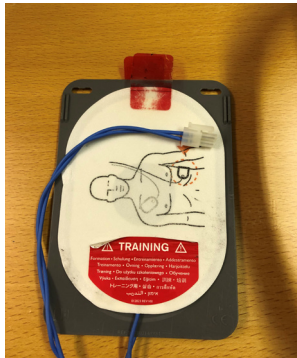

4. gamla elektroder, spara den hårda plattan och sätt de nya elektroderna på.



5. De nya elektroderna som skall fästas i det vita låset.



Elektroder finns att beställa på www.samverkandesjukvard.se klicka på: 1. medarbetarsidan 2. utrustning 3. samverkande sjukvårds beställning och felanmälan.