

Dagligkontroll av HeartStart FR3

HeartStart FR3placering: _____

HeartStart FR3 nummer: _____

Datum									
Redo-lampan blinkar grön, Självtest godkänd.									
Signatur									
Anmärkning									

KONTROLLERA DEN GRÖNA REDO-LAMPAN

Om den gröna redo-lampan blinkar har FR3 genomgått ett godkänt självtest och är klar för användning. Ingen åtgärd erfordras.

Om den gröna redo-lampan är släckt och FR3 piper kontinuerligt så behöver den tillsyn.

OM FR3 LARMAR

Om FR3 avger enstaka pip trycker du på PÅ/AV-knappen för att starta FR3. När röstmeddelandena startar ska du trycka på PÅ/AV-knappen igen för att visa statusskärmen som ger information om FR3:s status, eventuella problem och eventuella åtgärder. Notera felet och slå av FR3. Om problemet är att batteri är slut så byt batteri och låt enheten genomgå en självtest vid start. Det gamla batteriet slängs i avsatt behållare för batterier på arbetsplatsen. Om självtesten godkänns så är enheten klar att användas. Om problemet inte kan åtgärdas av batteribyte, kontakta Samverkande sjukvård.

